




## Histeropexia sacra para prolapso uterino asistida por el sistema da Vinci®



©2008 Intuitive Surgical, Inc.



SISTEMA REPRODUCTIVO SALUDABLE

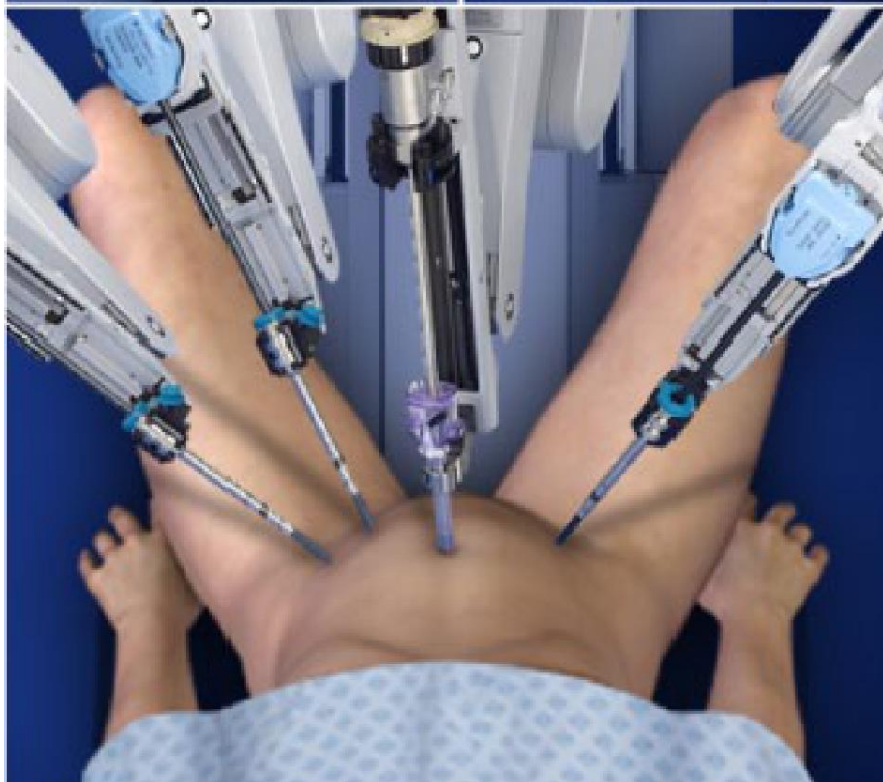

### Descripción general

Este procedimiento mínimamente invasivo, realizado con el Sistema quirúrgico da Vinci, se utiliza para restaurar un útero que se ha caído en o que ha sido empujado a través de la vagina. Durante este procedimiento, se coloca una malla quirúrgica de soporte y se la ajusta, para levantar el útero a su posición normal.

### Preparación

En preparación para el procedimiento, se anestesia a la paciente y se la coloca sobre una plataforma ajustable. Esto le da a los brazos quirúrgicos mecanizados pleno acceso al abdomen. Se limpia la piel y se introduce una aguja delgada a través de la pared abdominal, hacia la cavidad abdominal. Esta aguja se usa para inflar el abdomen con dióxido de carbono. Este gas separa los órganos para permitirle al cirujano verlos con claridad, creando así, un espacio de trabajo para los instrumentos quirúrgicos.

### Inserción del manipulador

El asistente del cirujano inserta un manipulador dentro de la vagina. Esto permite que la vagina sea movida y posicionada según se lo necesite. Se puede insertar un dispositivo como dentro del recto para proteger a los intestinos durante la cirugía.

### Acceso al abdomen

Se realizan cinco incisiones pequeñas en el abdomen. La cirugía se llevará a cabo a través de estos pequeños puertos, en lugar de la incisión grande usada tradicionalmente para la cirugía abierta. Este método mínimamente invasivo reduce el dolor, las cicatrices, el riesgo de infección y el tiempo de recuperación.

### Inserción del endoscopio

La cámara endoscópica y varios instrumentos quirúrgicos son guiados a través de estos puertos. Los brazos robóticos del sistema da Vinci sostendrán con seguridad dichos instrumentos. El cirujano se sienta ante la consola para realizar el procedimiento. Un monitor de vídeo en la consola, vinculado al endoscopio, le permite al cirujano ver el sitio quirúrgico en 3D. El cirujano puede controlar los instrumentos con precisión durante la cirugía.

### Fijación de la malla

Se inserta y se sutura una malla quirúrgica en la parte frontal y trasera del cuello del útero. Se levanta el útero con cuidado y se sutura la malla a un ligamento fuerte que recubre el hueso sacro. La malla sostendrá el útero y lo mantendrá en su posición normal.

© 2014 Swarm Interactive. Unauthorized duplication is strictly forbidden.

Fin del procedimiento